



Dwell-Clicking Software

Quick Manual

日本語マニュアル

Dwell-Clicking ソフトウェアの使い方

Dwell-Clicking Software

Quick Manual



目次

- NaturalPoint Dwell-Clicking ソフトウェアの使い方 1
- Dwell-clicking ソフトウェアを使用するには 2
- ツールバーの設定 3・4
- Dwell-clicking ツールバーの表示について 4
- Dwell-clicking ソフトウェアの機能詳細 5






Dwell-Clicking Software

Quick Manual



NaturalPoint Dwell-Clicking ソフトウェアの使い方

Dwell-clicking のコンセプトは、コンピューターの操作すべてをハンズフリーで行えるようにすることです。現在、一般的なマウスやキーボードの操作が難しい人々でも、SmartNAV を使えば、マウスカーソルを正確に操作することができます。また、一方で、マウスボタンのクリックを有効にするために、異なったオプションが用意されています。このチュートリアルが、SmartNAV AT モデルでマウスクリック操作を可能にします。

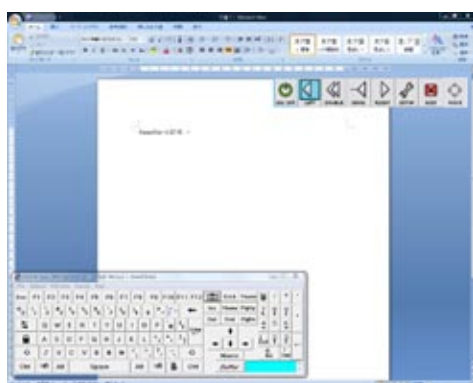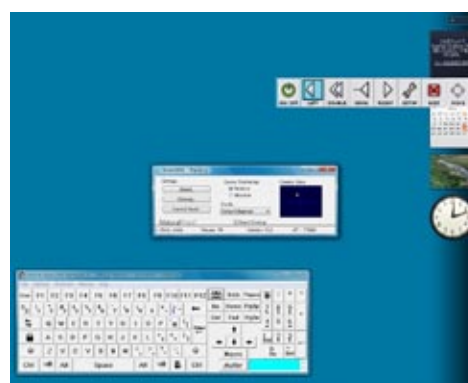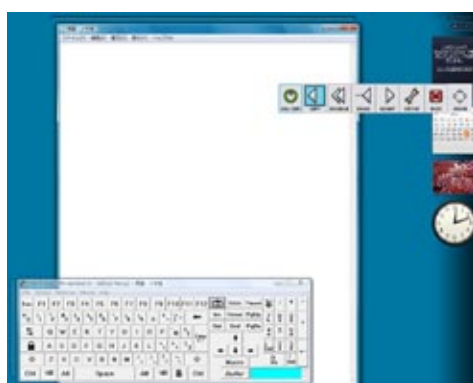

Dwell-Clicking Software

Quick Manual



■ Dwell-clicking ソフトウェアを使用するには


Dwell-clicking ツールバー（画像参照）がユーザーがカーソルをアイコンやボタンやボタンの上に保持し続けることで左クリック、ダブルクリック、ドラッグ、右クリックを可能にします。だから「Dwell-clicking（保持クリック）」なのです。Dwell-clicking の特徴は、すべてのバーチャルキーボードと Windows が持つユーザー補助機能に対して完全に互換性を保っていることです。この方法を用いてクリックするのにいったん慣れてしまうと、好みに応じてセッティングを変更することで、より自然に操作できるようになります。

まずは SmartNAV ソフトウェアを使って Dwell-clicking を有効にしますが、それには 2 通りの方法があります。


方法 1 スタートアップスクリーンから Dwell-clicking を有効にする



方法 2 セッティング画面から Dwell-clicking を有効にする

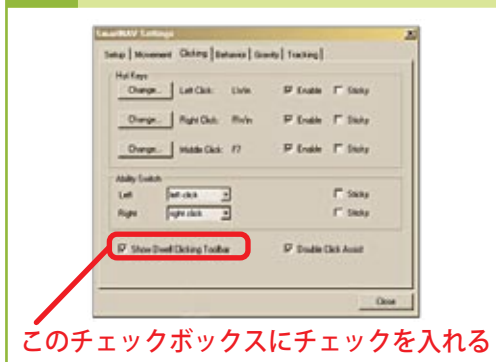

Dwell-clicking ツールバーを有効にした後、ツールバーが実際に起動するのを確認してください。このように見えるはずですが。

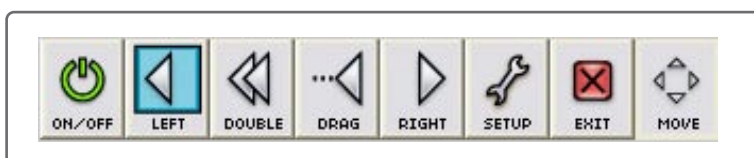

← Dwell-clicking ツールバー

ツールバーが「常に前面に表示される (Always Be on Top)」に設定されていても、すべてのプログラムが、この設定に従うわけではなく、ツールバーがウィンドウの後ろ側にポップアップすることもありますのでご注意ください。SmartNAV ソフトウェアから Dwell-clicking を有効にしてクリックした後、ツールバーが見当たらない場合は、タスクバーを見て起動中のウィンドウを確認し、すべてのプログラムを最小化すれば、ツールバーが見つかるでしょう。

Dwell-Clicking Software

Quick Manual



ツールバーの設定



先に書いたとおり Dwell-clicking の基本コンセプトは、クリックしたいアイテムにカーソルを合わせれば、Dwell-clicking ソフトウェアが自動的にクリックするというものです。しかしながら、より快適な操作性と効率性を求めるならば、ソフトウェアのお使いの前にいくつかの設定オプションと、知っておくべき特性があります。

● Dwell-clicking ツールバーを設定する



Dwell-clicking オプションボックスを開くためには、ツールバーの左から 6 番目の、レンチのアイコンのボタンをクリックしてください。システムがクリックされるまでカーソルを一箇所に保持しつづける時間と、その間のカーソルのブレの許容範囲を調整できるポップアップボックスが開きます。

● クリックタイムスライダバー



クリックタイムスライダバー設定では、ソフトウェアがクリックを行うまでにマウスを静止させる時間を設定します。このスライダバーで、Dwell-clicking の時間間隔を 0.2 ～ 2 秒設定できます。また設定時間はクリックタイムスライダバーの右側で緑色でグラフィカルに表示されます。

● ムーブメントスレッシュホールド

お使いの方によっては、ポインターを設定された時間まで止めることが難しい事があるかもしれません。ムーブメントスレッシュホールドスライダバーはより小さい動きにつり合うことを許します。Dwell-clicking (保持クリック) を起こさせる間、動く範囲のしきい値によって、カーソルの静止時間作り Dwell-clicking (保持クリック) の設定時間のカーソルの静止を実現させ、その結果、Dwell-clicking (保持クリック) が無視されることを防ぎます。このスレッシュホールドスライダバーは 2 ～ 20 ピクセルの間で動きのしきい値調整することが可能です。

● サウンドチェックボックス

チェックボックスにチェックを入れると、Dwell-Click が実行されたとき音が鳴って知らせてくれます。

Dwell-Clicking Software

Quick Manual



ツールバーを設定します。(つづき)



● ボタンバーサイズセレクター

Size メニューで、ボタンバーのサイズを変更できます。

● Dwell-clicking ソフトウェアのポーズ



Dwell-clicking ソフトウェアの必要不可欠な機能は、簡単に ON/OFF 出来るという機能です。Dwell-clicking ソフトウェアはポインターが一時停止する度にアクティブになります。

なにかしようと思う前に時間が過ぎ Dwell-clicking (保持クリック) が実行されてしまいます。これは SmartNav をお使いいただく際にお使いのコンピュータをなにか違う動作にしてみさないように、予期せぬ Dwell-clicking (保持クリック) が起きないためにマウスポインターを動かし続けなければなりません。快適にお使いいただくことが出来るよう、左上のボタンを使って Dwell-clicking ソフトウェアのポーズ(一時休止)とアクティブ(動作中)を ON/OFF できるようになっています。ボタンが緑色の時は、Dwell-clicking (保持クリック) が画面全体で有効です。赤色の時、Dwell-clicking (保持クリック) が赤色のボタンだけが有効です。ですので、赤色表示時にカーソルで Dwell-clicking (保持クリック) するとポーズを解除出来ます。

Dwell-clicking ツールバーの表示について

Dwell-clicking ツールバーは表示によっていろいろな機能を表します。Dwell-clicking ソフトウェアのポーズ、シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、右クリック、Dwell-clicking ソフトウェアの設定、Dwell-clicking ソフトウェアを終了、などについてご説明します。

● Dwell-clicking ボタンの表示の違いについて

Dwell-clicking ツールバーには 3 つの表示状態があります。



不選択

ボタンが選択されていません。標準でそのボタンの機能が実行されないことを意味します。



ダッシュ

ボタンは選択されていますが、この状態は一度だけボタンの機能が実行される事を意味し、実行後は不選択になります。



ハイライト

標準で常にそのボタンの機能が実行される状態を表します。

Dwell-Clicking Software

Quick Manual



Dwell-clicking ソフトウェアの機能詳細



最初に Dwell-clicking ソフトウェアを起動したときは、LEFT ボタンが選択されています。これは左シングルクリックが標準で選択されていることを示します。他のボタンを標準で選択するには、一度ご希望のボタンを選択し、その後カーソルを他の任意の位置に合わせしばらくして再度ご希望のボタンにカーソルを移動すると、標準状態でそのボタンの機能になります。



左クリックボタン (LEFT)

左から 2 番目のボタンは左シングルクリックとして動作します。このボタンがダッシュのときは、一度だけ左クリックの動作をします。ハイライトの場合は、シングルクリック機能がロックされ一回一回シングルクリックボタンにカーソルを移動しなくても継続してシングルクリックを利用出来ます。



ダブルクリックボタン (DOUBLE)

左から 3 つめのボタンは左ダブルクリックとして動作します。このボタンがダッシュのときは、一度だけ左ダブルクリックの動作をします。ハイライトの場合は、ダブルクリック機能がロックされ一回一回ダブルクリックボタンにカーソルを移動しなくても継続してシングルクリックを利用出来ます。



ドラッグボタン (DRAG)

左から 4 つめのボタンはドラック動作として動作します。このボタンがダッシュのときは、一度だけドラックの動作をします。ハイライトの場合は、ドラック機能がロックされ一回一回ドラックボタンにカーソルを移動しなくても継続してドラックを利用出来ます。



右クリックボタン (RIGHT)

左から 5 つめのボタンは右クリックボタンとして動作します。このボタンがダッシュのときは、一度だけ右クリックの動作をします。ハイライトの場合は、右クリック機能がロックされ一回一回右クリックボタンにカーソルを移動しなくても継続して右クリックを利用出来ます。



クローズボタン (EXIT)

このボタンを選択すると Dwell Clicking ソフトウェアが終了します。



ツールバー移動ボタン

ツールバーの一番右側にあるこのボタンは、ツールバーを移動することが出来ます。移動させるには、最初に DRAG ボタンを選択し、その後このボタンにカーソルを合わせるとご希望の場所に移動させることが出来ます。